

VEILEDNING TIL HÅRPRØVETAKING FOR DNA-BASERT SLEKTSKAPSKONTROLL

Utstyr for prøvetaking: Tang/pinsett, maskeringstape (eller liknende), papirkonvolutt.

1. Det anbefales at hårprøvene tas i nakken på grisen, der det ofte er kraftige hår med store hårsekker.

2. Bruk en tang/pinsett og samle sammen en liten tuft med hår.

Klem tangen godt sammen og napp ut hårene.



Hårsekkene må være med, ellers må prøvene tas på nytt! Det er i hårsekkene at DNA'et er.


3. Hårprøven bindes som en pen, jevn bunt med tape ca 1-2 cm fra enden av hårroten.

Napp ut hår og samle i bunten til du har minimum 20 hårstrå med hårsekker.



4. Merk prøven med både medlemsnummer og individnummer.

Er individnummer ukjent, nummerer prøvene slik at de kan spores tilbake til grisen de ble tatt fra.

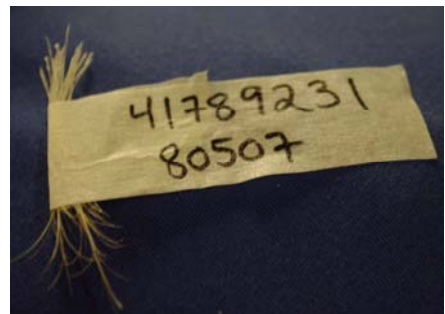

5. Legg prøvene i en papirkonvolutt sammen med skjemaet for farskapstest, og send til:

**BioBank AS
Holsetgt 22
2317 Hamar**